

dexcom

neugieri

G7

Diabsmart

dexcom

Ihr Weg zum maßgeschneiderten Diabetesmanagement mit Dexcom...

Franziska Tränckner
Territory Sales Manager Thüringen

DiabSmart 10.10.2023



Diabsmart



Warnung „Niedriger Wert“

Warnt, wenn der Sensor-Messwert den **eingestellten Wert erreicht hat oder unterschreitet**.


Standard: 3,9 mmol/L

Bereich: 3,3 mmol/L - 8,3 mmol/L

Hinweis:

→empfohlener Zielbereich 3,9 – 10 mmol/L

→nicht zu niedrig einstellen – je früher die Warnung umso früher kann reagiert werden!

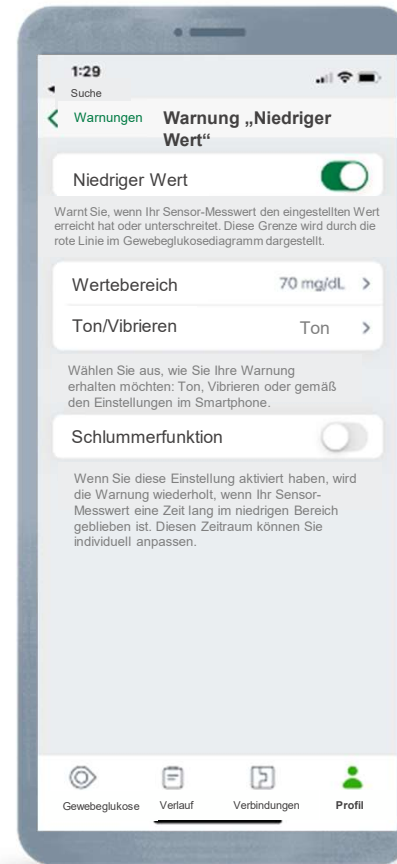

Dexcom G7 App



Empfänger



Fest installierter Hypo-Sicherheitsalarm


„Niedriger Wert (dringend)“

Alarmiert, wenn der Sensor-Messwert
3,1 mmol/L oder weniger beträgt.


Hinweis:

→ kann nicht geändert oder deaktiviert werden

→ erst deaktiviert wenn der Sensor eine
Steigung im Gewebezucker wahrnimmt

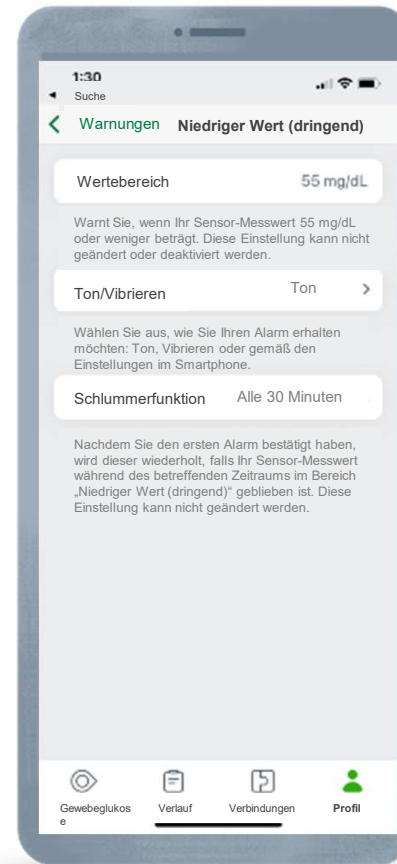

Dexcom G7 App

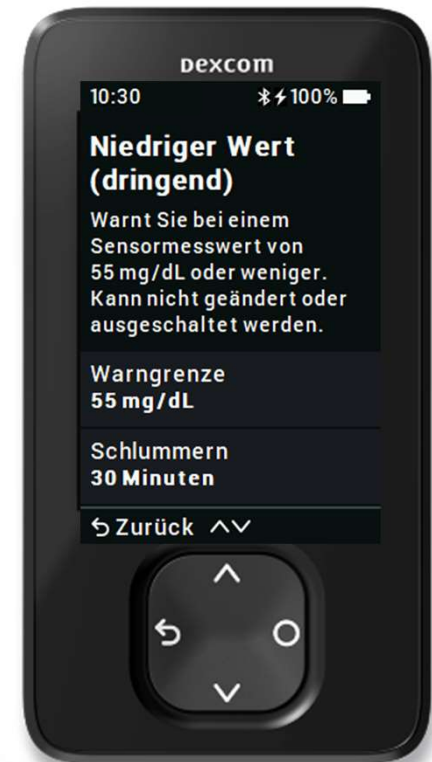

Empfänger




Hypo-Vorwarnung

„Bald niedriger Wert (dringend)“


Warnt, wenn der Sensor-Messwert in **weniger als 20 Minuten 3,1 mmol/L oder weniger** betragen wird.

Hinweis:

→ wer bereits beim Voralarm reagiert, kann mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Hypo-Sicherheitsalarm vermeiden

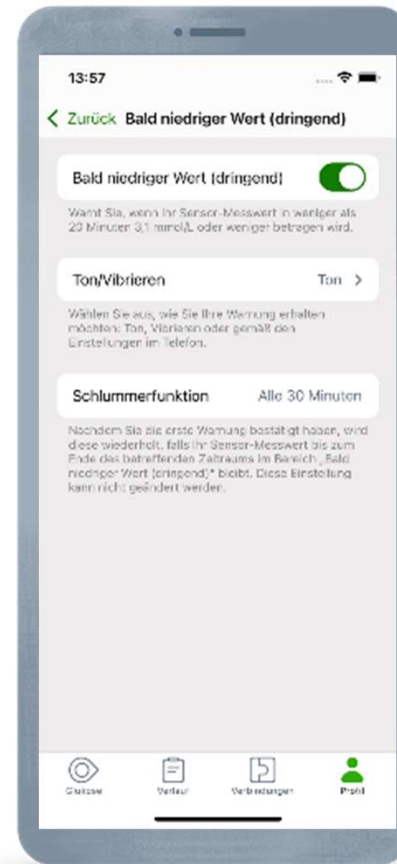

Dexcom G7 App

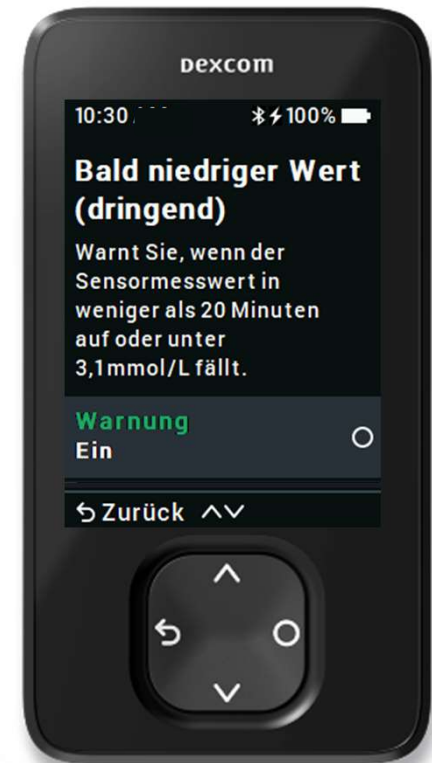

Empfänger



Warnung

„Hoher Wert“


Warnt, wenn der Sensor-Messwert den **eingestellten Wert erreicht hat oder überschreitet**.

Standard: 14 mmol/L

Bereich: 5,5 mmol/L - 22,2 mmol/L

Hinweis:

→realistische und sinnvolle Werte einstellen!

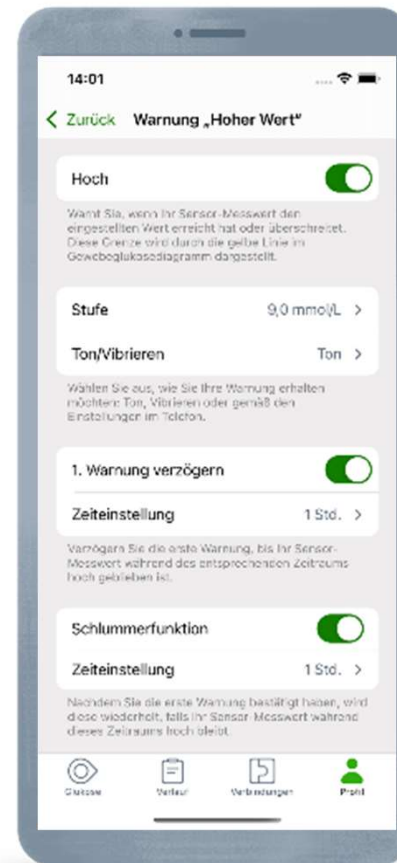


Dexcom G7 App



Empfänger



1. Hoch-Warnung verzögern

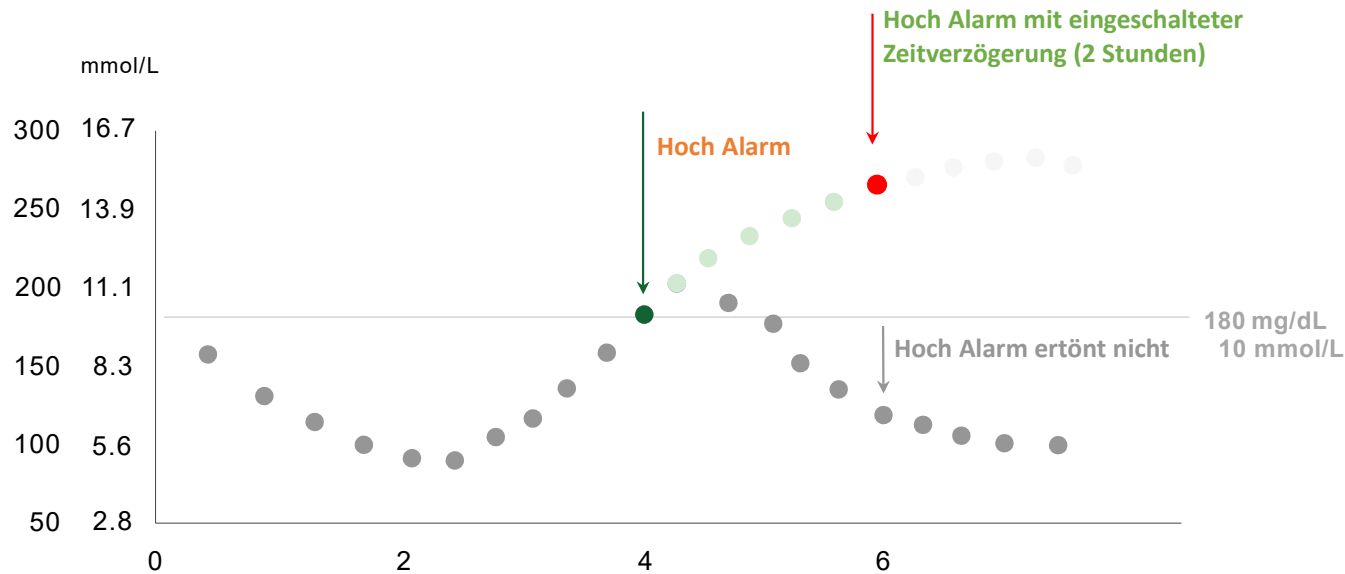

Hinweis: Dient nur zur Veranschaulichung.

1. Hoch-Warnung verzögern, ermöglicht es dem Patienten, den ersten Alarm so lange zu verzögern, bis der Sensormesswert den gesetzten Schwellenwert für eine bestimmte Zeitspanne erreicht oder überschritten hat.







Warnung



„Schnell steigend/fallend“

Warnt, wenn die Sensor-Messwerte **schnell ansteigen/fallen**.

Zusätzlich kann ein **Grenzwert definiert** werden, bei dem die Warnung ertönen soll, sobald er über- bzw. unterschritten wird.

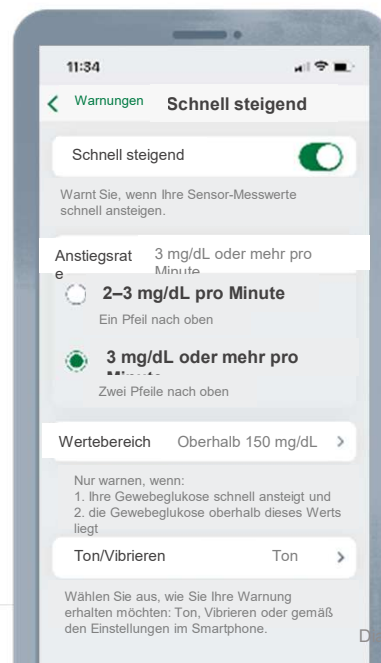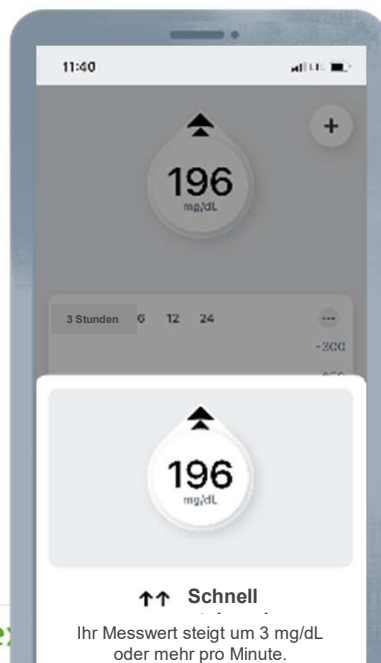

Dexsmart - 10.10.2023

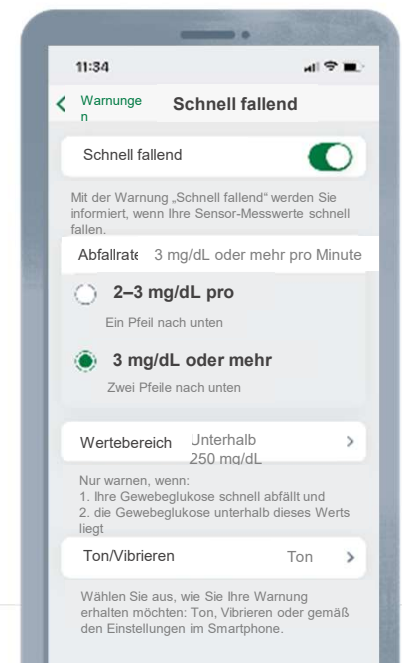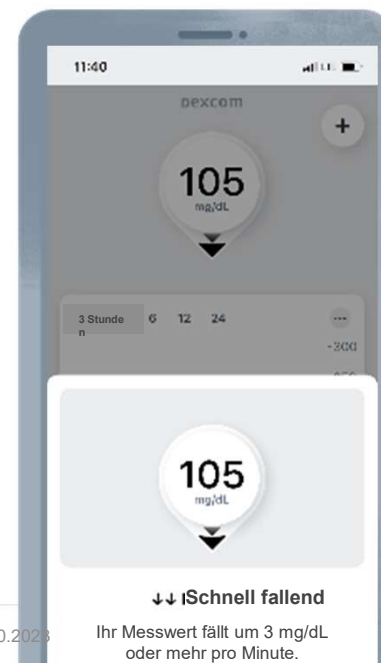



Ruhemodi

Dexcom G7 App

Vibrieren

Alle Warnungen vibrieren bis zu 6 Stunden lang bzw. zeitlich unbegrenzt.

→ gilt nicht für den Alarm „Niedriger Wert (dringend)“ und die Warnung „Sensorfehler“ (akustischer Hinweis!)

Alle stumm

Kein Ton und kein Vibrieren bei sämtlichen Warnungen (auch nicht bei Alarm „Niedriger Wert (dringend)“ und der Warnung „Sensorfehler“).

→ max. für einen Zeitraum von maximal 6 Stunden

Hinweis:

→ bitte mit Bedacht verwenden!






Zweites Warnprofil


Nur in der Dexcom G7 App

z.B. ein **Profil für die Nacht oder die Arbeitszeit**. Zwischen diesen Profilen kann der/die Anwender/-in wechseln, oder Profile vorprogrammieren.

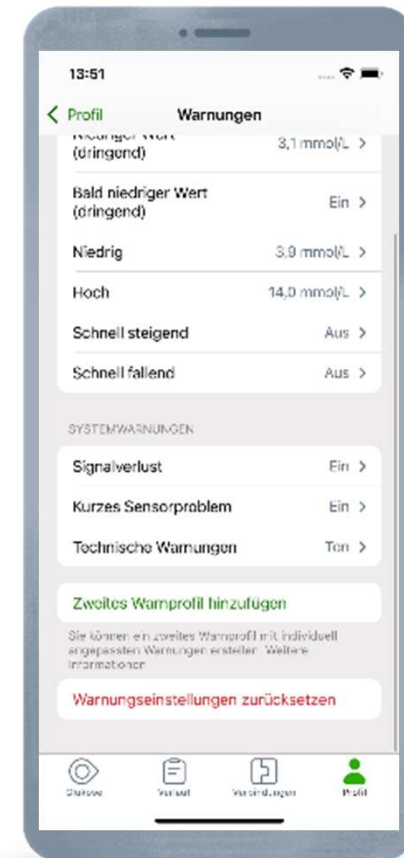



Sensortragestellen

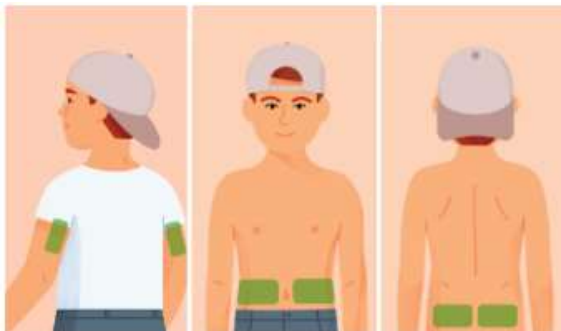

24 Monate bis 6 Jahre

An der Rückseite des Oberarms, am Bauch oder im oberen Gesäßbereich



7 Jahre und älter

An der Rückseite des Oberarms oder am Bauch

Komfort beim Setzen

Bei einer Befragung gaben 94 % der Teilnehmer an, dass das Setzen des Sensors nicht schmerzhaft gewesen sei (geringfügige / keine Schmerzen).*

Die folgenden Bereiche sollten gemieden werden!

- Bereiche mit schlaffer Haut oder zu wenig Fettgewebe, in denen der Kontakt mit Muskeln und Knochen nicht vermieden werden kann
- Bereiche, die Stößen oder Druck ausgesetzt sind oder auf denen der/die Anwender/-in beim Schlafen liegt
- Bereiche im Umkreis von 8 Zentimetern um eine Infusions- oder Injektionsstelle
- Bereiche am Hosenbund oder mit Hautreizungen, Narben, Tattoos oder starker Behaarung

* Bedienungsanleitung. Dexcom G7 Benutzerhandbuch.

Technische Daten, S. 153: Bei einer Befragung gaben 94 % der Teilnehmer an, dass das Setzen des Sensors nicht schmerzhaft gewesen sei (geringfügige/keine Schmerzen).

Zusammenfassung

- Diverse **individualisierte Alarmer/Warnungen**
- Nur diejenigen Alarmer/Warnungen verwenden, die wirklich für die jeweilige Person **von Nutzen und/oder sinnvoll** sind (**→je mehr eingestellt, umso mehr Alarmer/Warnungen!**)
- Sinnvolle Grenzwerte/Warnhöhen einstellen (**Prävention statt Reaktion!**)
- **Alle Alarmer/Warnungen** (außer Hyposicherheitsalarm) können **ausgeschaltet** werden
- Mehrere Tragestellen geben Flexibilität im Alltag

Jede/r Patient/in hat die Möglichkeit sich sein/ihr eigenes CGM-System zu erschaffen.

Praktische Hinweise

Bei Wechselwunsch:

- Ein **Wechsel des Versorgers** (innerhalb von Systemen) ist **auch innerhalb einer laufenden Dauerversorgung** möglich. Wichtig ist **Begründung** (z.B. Messungenauigkeit, Pflasterallergien, Wunsch zur Kopplung von AID-Systemen...)
- Eine **Umstellung von G6 auf G7** ist auch **innerhalb einer laufenden Jahresversorgung** durch Dexcom möglich. Bitte beachten Sie die Zeiträume der Lieferungen. **Informationen zum Zeitraum der Lieferung** finden Sie auf der **Empfangsbestätigung**.
 - z.B. Ihre aktuelle Quartalslieferung endet am 30.11.2022 d.h.:
 - ab 01.12.2022 können Sie mit G7 versorgt werden
 - ein neues Rezept bitte frühestens 6 Woche vor Ende der aktuellen Lieferung einreichen

Zum Probetragen:

- Über Ihre **Diabetologische Praxis** oder Ihren **zuständigen Außendienst**
- Eine **Liste kompatibler Smartphone** finden Sie hier: [Kompatibilität G7](#)
- **Empfangsgeräte und Sensoren** stehen in ausreichender Menge zur Verfügung

dexcom

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Franziska Tränckner

Telefon: 0171 350 96 92

E-Mail: franziska.traenckner@dexcom.com

Customer Service DE

Telefon: 0800 7246447

E-Mail: de.info@dexcom.com

Technischer Support

Telefon: 0800 7246447

www.dexcom.com/DETechSupport

